



INSTRUKCJA OBSŁUGI

YANO 200

Dziękujemy za wybór alkomatu Yanosik YANO 200.
Stworzyliśmy to urządzenie z myślą o Twoim bezpieczeństwie.

Przeczytaj uważnie instrukcję i sprawdź, jak łatwo możesz przeprowadzić dokładne badanie stanu swojej trzeźwości..

UWAGA!

Nie wykonuj badania tuż po spożyciu alkoholu, jedzeniu ani paleniu papierosów – odczekaj co najmniej 20 minut, aby nie uszkodzić sensora i uzyskać wiarygodny wynik.

1. ZASILANIE

Przed użyciem alkomatu należy włożyć 2 baterie AAA, zgodnie z oznaczeniami biegunów i następnie uruchomić urządzenie, według dalszej instrukcji.

2. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krok 1: Włóż 2 baterie AAA

Krok 2: Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy

Krok 3: Po komunikacie „BLOW” – włóż ustnik, wciągnij powietrze, wydmuchuj ciągle, aż usłyszysz kliknięcie

Krok 4: Poczekać na sygnał i wynik – „WAIT” -> wynik po sygnale

Krok 5: Urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach bez użycia

Krok 6: Kolejny test? Naciśnij przycisk raz

Krok 7: Po pozytywnym wyniku – zmień ustnik, wykonaj test pasywny

Krok 8: Aby wyłączyć – przytrzymaj przycisk przez 5 sekund

Kalibracja zalecana co 1000 testów. Po 900 testach licznik pokaże liczbę użyć przy włączeniu urządzenia. Po 1000 pojawi

się komunikat „CAL” – wtedy urządzenie należy oddać do kalibracji*.

*Opis kalibracji znajduje się na stronie 3.

UWAGA!

Aby wykonać test natychmiast po uzyskaniu wyniku POZYTYWNEGO, upewnij się czy w alkomacie nie znajdują się pozostałości alkoholu z wcześniejszego pomiaru.

Wymień ustnik na nowy i wykonaj test pasywny (naciśnij ON/OFF Jeśli wynik wynosi 0.00, wykonaj kolejny test.

Wielokrotne używanie (w krótkich odstępach czasu) tego samego ustnika, może spowodować zalanie lub uszkodzenia sensora. Po każdym pomiarze zalecamy wymianę ustnika na nowy. Pozostające opary lub krople alkoholu mogą zawyżać pomiary.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Parametr	Wartość
Czujnik	Elektrochemiczny (ogniwo paliwowe)
Zakres pomiaru	0,000 – 0,400 %BAC
Dokładność	±10% (przy <0,10 %BAC)
Zasilanie	2 × AAA (alkaliczne)
Pamięć	100 wyników
Wymiary	100 × 38 × 18 mm
Waga	50 g z bateriami
Temp. pracy	0°C – 40°C
Temp. przechowywania	-20°C – 70°C

4. KALIBRACJA – KIEDY?

- Zalecamy przeprowadzanie kalibracji alkomatu **co 1000 testów** lub **co 6-12 miesięcy**.
- Po 900 testach licznik na alkomacie przypomni o konieczności kalibracji.
- Po 1000 testach urządzenie pokaże komunikat „**CAL**”.

5. KALIBRACJA – GDZIE?

Przejdź na stronę <https://alcolife.pl/>, **wybierz zakładkę „SERWIS”**, a następnie załóż konto lub zaloguj się.

Wypełnij zgłoszenie serwisowe i czekaj na e-mail z numerem usługi oraz informacją, w jaki sposób dostarczyć urządzenie do serwisu.

Po przyjęciu przez serwis, alkomat zostanie skalibrowany i przetestowany.

Poinformujemy Cię, gdy urządzenie będzie już gotowe do wysyłki. Zero formalności – wszystkie Twoje dane będziemy mieć już w systemie.

Kalibrację wykonuje serwis HUMANCARE POLSKA SP. Z O.O.

Kalibracja alkomatu jest darmowa przez **1 rok od daty zakupu**. Do kalibracji należy zachować **dowód zakupu**.

Koszt wysyłki alkomatu jest każdorazowo po stronie klienta.

6. WAŻNE

- **NIE WYKONUJ TESTU ZARAZ PO SPOŻYCIU ALKOHOLU I WYPALENIU PAPIEROSA, MOŻESZ USZKODZIĆ SENSOR.** Pomiary powinny być wykonywane **najwcześniej po 20 minutach od ostatnio spożytego alkoholu.**
- Kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub jest w niskiej temperaturze, będzie rozgrzewało się dłużej
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej
- Unikaj gorąca lub dłuższego wystawiania na działanie słońca
- Jeśli różnica pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami wynosi $>0.1\%$ test należy wykonać ponownie

- Podczas pobierania próby oddechu **NIE** blokuj wylotu
- Wyniki testu nie mogą być przedstawiane w sądzie.
- Zalecamy wykonać pomiar **co najmniej raz w miesiącu**, zwłaszcza w sytuacji, w której alkomat był nieużywany przez dłuższy czas.

Producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub niepoprawność wyników wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Wiele czynników (np. śladowe ilości różnych gazów w otoczeniu, dym, inne składniki w jamie ustnej, itp.) może wpływać na poziom alkoholu we krwi, odczyty są wartościami służącymi tylko jako punkt odniesienia. Ani sprzedawca ani producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania urządzenia.
PIŁEŚ? NIE JEDŹ!



Znak przekreślonego kosza informuje, że produkt ten, jako odpad, może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Polskie prawo, pod karą grzywny, zabrania wyrzucania zużytych części z tego urządzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddać je do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając tego typu przepisu chronisz środowisko naturalne. W cenę tego produktu wliczono opłatę recyklingową. Powyższa informacja dotyczy również baterii, jeśli są dodane do urządzenia. Segreguj odpady.

6. GWARANCJA YANO 200

- 24 miesiące na urządzenie
- 12 miesięcy na sensor
- Kalibracja nie jest objęta gwarancją

PIŁEŚ? NIE JEDŹ! Dbaj o siebie i innych.
Zespół Yanosik

Wyprodukowano dla: Yanosik S.A.

Przez **HUMANCARE POLSKA SP Z.O.O.**, ul. Jesionowa 6, 55-040
Żerniki Małe, Ph. + 48 609 961 661, serwis@alcolife.pl,
www.alcolife.pl

Made in PRC

Ver. 28052025_PL



Nazwa i model produktu: **ALKOMAT YANO 200**

Data Sprzedaży:

Numer faktury/paragonu:

WARUNKI GWARANCJI

1. HUMANCARE POLSKA z siedzibą w Żernikach Małych 55-040, ul. Jesionowa 6 (dalej: Gwarant) udziela 24-miesięcznej gwarancji na działanie urządzenia oraz 12-miesięcznej gwarancji na działanie sensora.

2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje dokładności wskazań i odczytów dokonywanych przy użyciu urządzenia, które mogą obniżyć się z upływem czasu w trakcie jego normalnego użytkowania, co nie stanowi wady urządzenia. Dla utrzymania prawidłowego działania urządzenia konieczne jest dokonywanie kalibracji, która jest odrębną usługą, nieobjętą niniejszą gwarancją (więcej szczegółów w części „Kalibracja”).

3. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.

4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu sprzedaży wskazanym w karcie gwarancyjnej.

5. Warunkiem skorzystania przez kupującego z niniejszej gwarancji jest przedstawienie łącznie: poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (uzupełnionej o datę sprzedaży urządzenia, numer faktury/paragonu i opatrzonej

pieczęcią Gwaranta) oraz dowodu zakupu urządzenia. Dokumenty uprawniające do skorzystania z gwarancji, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się za nieważne w przypadku, gdy zawierają jakiekolwiek zmiany, w szczególności poprawki, skreślenia i inne modyfikacje wpływające na ich czytelność.

6. Wady urządzenia lub sensora ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w Autoryzowanym Serwisie HUMANCARE POLSKA, ul. Jesionowa 6, 55-040 Żerniki Małe. Informacje o Autoryzowanym Serwisie HUMANCARE POLSKA można uzyskać na stronie: www.alcolife.pl, pod adresem e-mail: serwis@alcolife.pl bądź pod nr tel. + 48 609 961 661.

7. Dokonanie zgłoszenia gwarancyjnego następuje poprzez poinformowanie Gwaranta o rodzaju wady urządzenia poprzez wystanie wiadomości na adres e-mail serwis@alcolife.pl lub wypełnienie formularza na stronie www.alcolife.pl (zakładka „SERWIS”).

8. Gwarant weryfikuje zgłoszenie gwarancyjne, o którym mowa w pkt 7., dokonując wstępnej oceny charakteru wady urządzenia oraz zasadności zgłoszenia gwarancyjnego.

9. Naprawa ewentualnych wad urządzenia lub sensora powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniu albo wymiana urządzenia na nowe zrealizowana zostanie po weryfikacji i zaakceptowaniu zgłoszenia gwarancyjnego przez Gwaranta i dostarczeniu urządzenia do Autoryzowanego Serwisu HUMANCARE POLSKA urządzenia wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 6 powyżej.

10. Kupujący dostarczając urządzenie do Autoryzowanego Serwisu HUMANCARE POLSKA, w szczególności za pośrednictwem poczty polskiej, firmy kurierskiej albo jakichkolwiek innych podmiotów świadczących usługi przewozowe, zobowiązany jest zabezpieczyć je w odpowiedni sposób na czas przewozu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia do których doszło w trakcie przewozu.

11. Gwarant pokrywa zwrot kosztów dostarczenia mu urządzenia do wysokości odpowiadającej przeciętnym kosztom rynkowym.

12. Gwarant zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 30 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku konieczności zamówienia niezbędnych do wykonania naprawy części zamiennych, Gwarant zastrzega prawo wydłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim o dalsze 60 dni roboczych. O konieczności wydłużenia terminu naprawy Gwarant poinformuje kupującego w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

13. W przypadku uznania reklamacji urządzenie zostanie bezpłatnie naprawione albo wymienione na wolne od wad i dostarczone kupującemu na koszt Gwaranta.

14. Gwarant zobowiązuje się do wymiany produktu na nowy w przypadku, gdy:

- a) Autoryzowany Serwis HUMANCARE POLSKA stwierdzi wystąpienie wady niemożliwej do usunięcia,
- b) w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt 1., dokonano 3 napraw, a urządzenie nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z jego przeznaczeniem.

15. Uprawnienia z niniejszej gwarancji wygasają w przypadku:

- a) naruszenia plomby gwarancyjnej znajdującej się na produkcie,
- b) dokonania kalibracji produktu, jego naprawy lub konserwacji serwisowej poza Autoryzowanym Serwisem HUMANCARE POLSKA.

16. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub usterek wynikających z:

- a) winy użytkownika, w szczególności zalania, uszkodzenia mechanicznego, termicznego, chemicznego, wynikającego z niewłaściwego przechowywania produktu, jego błędnego użycia, zabrudzenia,
- b) uszkodzenia sensora wywołanego niewykonaniem kalibracji lub w wyniku błędnego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi
- c) powstałych w trakcie dostarczania urządzenia,
- d) wywołanych niewłaściwym napięciem zasilającym,

- e) działania siły wyższej i przypadków losowych,
- f) oddziaływania chemicznego spowodowanego wylaniem baterii,
- g) kalibracji, napraw albo modyfikacji dokonanych poza Autoryzowanym Serwisem HUMANCARE POLSKA.

17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.

18. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

KALIBRACJA

1. Kalibracja jest procesem dostrajającym oprogramowanie z sensorem testera na specjalnie przeznaczonych do tego symulatorach oraz przy wykorzystaniu odpowiednich wzorców.
2. Aby otrzymać dokładność wyników należy przeprowadzić profesjonalną re – kalibrację alkomatu pomiędzy 6 a 12 miesiącem użytkowania oraz cyklicznie ją powtarzać w toku eksploatacji urządzenia. Częstotliwość przeprowadzania kalibracji zależy od ilości wykonanych pomiarów (im więcej pomiarów tym alkomat częściej należy kalibrować) oraz od sposobu użytkowania jak i warunków przechowywania (zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia).
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kalibracji, a jej koszty każdorazowo ponosi kupujący. Niektóre z urządzeń objęte są programem darmowej kalibracji (więcej na www.alcolife.pl w zakładce „Serwis”)
4. Zaniechanie kalibracji przez użytkownika może spowodować uszkodzenie sensora, a niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń będących skutkiem takiego zaniechania.

Informacje o Autoryzowanym Serwisie HUMANCARE POLSKA można uzyskać na stronie:

www.alcolife.pl

lub pod adresem e-mail: **serwis@alcolife.pl**

HUMANCARE POLSKA, ul. Jesionowa 6, 55-040 Żerniki Małe

Tel. + 48 609 961 661

CERTYFIKAT ADIUSTACJI ALKOMATU

Testowanie oraz adiustacja wykonywana na
certyfikowanych urządzeniach Guth Laboratories
Inc. zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz
odpowiednimi procedurami. Obraz zawierający symbol,
Prostokąt, linia, design

Numer Seryjny	Data adiustacji	Wymagana data następnej adiustacji	Podpis i pieczętka
		NIELIMITOWANA KALIBRACJA (do 12 miesięcy od daty zakupu)	



ADIUSTACJA PRAWDIŁOWA,
WSKAZANIA POPRAWNE.

Kod serwisanta: ☐ 01HCP ☐ 02HCP

Przestrzegaj terminów kalibracji. **Nie wykonuj testów zaraz po spożyciu alkoholu, możesz spalić sensor.** Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi alkomatu. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych (jeśli dotyczy).